


病床分机

—— 产品安装使用说明 ——

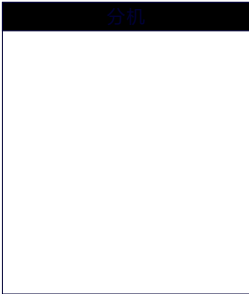

LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司



一、分机引线说明：

1、分机的白、黑、黄三芯引线

- (1) **分机与模拟病房门口机（NBN-BM）连接时：**将分机背后的白、黑、黄三芯线对应并并联到模拟病房门口机接分机接口（1、2、3）总线上；如不用门口机，也可接在主机总线接口（1、2、3）上。
- (2) **分机与模数病房门口机（NN-B10B/NN-B10A）连接时：**将分机背后的白、黑、黄三芯线对应并并联到模数病房门口机的1、2、3总线上。

2、分机的黄、红、黑三芯引线

- (1) **分机与门灯的连线：**如配有门灯，将三色门灯上的黄、红、黑三芯引线对应并接到分机的黄、红、黑三芯引线上。
- (2) **分机与按钮接线盒的连线：**如配有按钮接线盒，将按钮接线盒上的电源、信号、地接线柱对应并连接到分机的黄、红、黑三芯引线上，按钮接线盒的5组2芯引线可外接5个防水按钮。

注：为了提高系统稳定性和抗干扰能力，建议模数主机到分机端（或病房门口机到分机端）的总线采用三芯屏蔽线，线材耐温需在105℃。分机安装完毕后，要将总线屏蔽层全部连通，中间不要出现断层，并将屏蔽层头或尾的一端接大地。

二、基本设置：

例：将分机编码成5号分机
将一台分机或多台分机与病房门口机、主机相连后，通电后进入开机自检状态。待自检完毕，点击主机（或病房门口

三、使用说明：